



# Calligator

Agent de rinçage spécial à utiliser dans les lave-bassins DISCHER  
Concentré liquide



<b>Champ d'application principal</b>	Contre les précipités de calcaire dans les générateurs de vapeur des lave-bassins
<b>Propriétés :</b>	<p>Calligator est un produit de rinçage légèrement acide avec des composants spéciaux visant à réduire efficacement la dureté de l'eau. Grâce au bon pouvoir de liaison du calcaire et à l'excellent mouillage, le bassin est rincé de sorte à éliminer toutes taches et dépôts de calcaire.</p> <p>Une utilisation conforme empêche l'accumulation de calcaire dans le générateur de vapeur ou dans les canalisations.</p> <p>Calligator est utilisable avec toutes les duretés de l'eau.</p>
<b>Application et dosage :</b>	<p>Calligator est utilisé dans les lave-bassins DISCHER. Dosage : 0,5 - 1,5 ml/l, selon la dureté de l'eau, via des appareils de dosage intégrés. Veiller à la résistance aux acides des systèmes de dosage et des générateurs de vapeur. Cela a été testé et confirmé pour les lave-bassins DISCHER.</p> <p>Ne pas mélanger avec d'autres produits.</p> <p>Avant de changer de produit, rincer à l'eau le système de dosage, y compris les tuyaux d'aspiration.</p> <p>Effectuer le traitement conformément à la législation sur les appareils médicaux et aux réglementations applicables avec des procédures validées appropriées.</p> <p>Respecter les informations du fabricant de produits médicaux relatives au traitement conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.</p> <p>Respecter les instructions d'utilisation des fabricants d'appareils de nettoyage et de désinfection.</p> <p>Uniquement pour les applications commerciales.</p>
<b>Caractéristiques techniques :</b>	<p>Densité (20 °C) : environ 1,1 g/cm<sup>3</sup> Plage de pH (déterminée dans de l'eau complètement déminéralisée, 20 °C) 0,5 - 1,5 ml/l : 3,4 – 3,1 Viscosité (concentré, 20 °C) : &lt; 50 mPas</p>
<b>Ingrédients :</b>	Ingrédients pour détergents selon le règlement CE 648/2004 sur les détergents : < 5 % de polycarboxylates, aussi : conservateur (méthylchloroisothiazolinone / méthylisothiazolinone)
<b>Marquage CE :</b>	 <p>Calligator répond aux exigences de la législation européenne sur les appareils médicaux. Si un incident grave se produit avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.</p>
<b>Entreposage :</b>	Entreposer à l'abri du gel. L'entreposage nécessite de maintenir une température comprise entre 0 et 30 °C. Peut être conservé 3 ans dans des conditions d'entreposage correctes. Utilisable jusqu'à : voir l'impression sur l'étiquette située derrière le symbole 
<b>Avertissements et consignes de sécurité :</b>	Vous trouverez des informations sur la sécurité ainsi que sur l'environnement dans les fiches de sécurité. Éliminer les récipients uniquement lorsqu'ils sont vides et fermés. Élimination des résidus de matériaux de remplissage : voir la fiche des données de sécurité.

# Calligator

Agent de rinçage spécial à utiliser dans les lave-bassins DISCHER  
Concentré liquide



**Distribution :**

Distribué par : DISCHER Technik GmbH, Fuhr 4-6, 42781 Haan-Gruiten, Allemagne, Tél. : +49 (0) 2104 2336-0, [info@discher.de](mailto:info@discher.de), [www.discher.de](http://www.discher.de)

Importateur en Suisse : Morath AG, Paradiesrain 6, CH-4123 Allschwil

**Fabrication :**



Fabriqué par : Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hambourg, Allemagne, tél. : +49 (0)40 7 89 60-0

*Les informations contenues dans la présente notice sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Elles ne dispensent toutefois pas l'utilisateur d'effectuer ses propres tests et essais. Aucune garantie juridique contraignante de certaines caractéristiques ne peut en être déduite.*

Version 11/2021